



Tryb PAUZA - urządzenie można zatrzymać, a po pauzie można kontynuować program. Poniżej znajdziesz diagramy procedur operacyjnych każdego programu; czarne kropki, które wskazują Sekcje są w fazie inflacji.

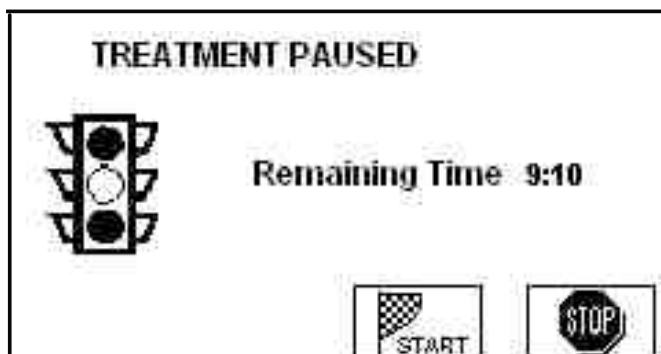

Szybkie opróżnianie komór po zakończeniu zabiegu.

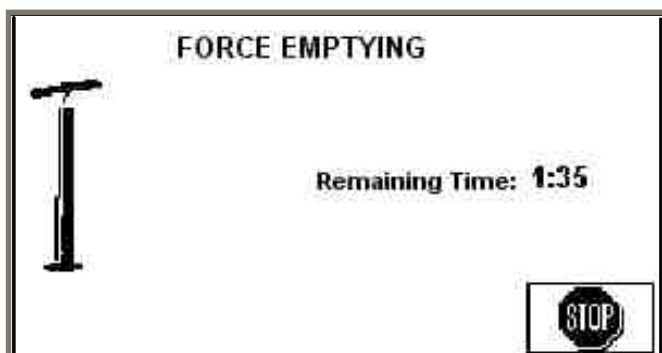

PRZYKŁAD programów w pamięci modelu BEUTYPRESS:

Program 1 PICOTAGE

W tym programie sekcje napełniają się i opróżniają powietrze w kierunku od dołu do góry, począwszy od strefy podkolanowej. Efekt, który jest otrzymywany jest podobny do powierzchniowego masażu (dla pacjentów, którzy spędzają długie okresy czasu siedząc).

| Phase s-> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| Section 1 | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | |
| Section 2 | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | |
| Section 3 | | | | | | | | ○ | | | | | | | | |
| Section 4 | ○ | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| Section 5 | | ○ | | | | | | | | ○ | | | | | | |
| Section 6 | | | ○ | | | ○ | | | | | ○ | | | | | |
| Section 7 | | | | | ○ | | | | | | | | ○ | | | |
| Section 8 | | | | ○ | | | | | | | | ○ | | | | |

Program 2 PICOT-MIX

W tym programie, który posiada cechy podobne do pierwszego, jedna sekcja napełnia się w czasie, od stopy do góry. Jest to program odpowiedni dla tych, którzy cierpią z powodu spuchniętych kostek (klientów, którzy spędzają dużo czasu w pozycji stojącej).

| Phases -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| Section 1 | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | |
| Section 2 | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | |
| Section 3 | | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | |
| Section 4 | ○ | ○ | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | |
| Section 5 | | ○ | ○ | | | | | | | ○ | ○ | | | | | |
| Section 6 | | | ○ | | | | | | | | ○ | | | | | |
| Section 7 | | | | | ○ | | | | | | | | ○ | | | |
| Section 8 | | | | ○ | | | | | | | | ○ | | | | |

PROGRAM 3 FIZJOLOGICZNY

PROGRAM odpowiedni dla wszystkich pacjentów.

Pierwszy etap rozpoczyna się od sekcji 4 - podkolanowej, pracując od dołu do góry; tworzy optymalny drenaż.

Sekcje napelnione nałożone na siebie w niektórych fazach; podczas gdy wyższy sektor jest pompowany, strefa poniższej pozostaje napompowana i strefa nad nią zaczyna się napelniać. Program ten skutecznie usuwa zastoje i sprzyja reedukacji systemu limfatycznego.

| Phases -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| Section 1 | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| Section 2 | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| Section 3 | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| Section 4 | ○ | ○ | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| Section 5 | | ○ | ○ | | | | | | | ○ | ○ | | | | | |
| Section 6 | | | ○ | | | | | | | | ○ | | | | | |
| Section 7 | | | | | ○ | | | | | | | | ○ | | | |
| Section 8 | | | | ○ | | | | | | | | ○ | | | | |

PROGRAM 4 FISIO-BIS

Ten program jest podobny do poprzedniego, a le zaczyna się od sekcji stóp i porusza się w górę. Jest to korzystne dla pacjentów, którzy spędzają dłuższy czas w pozycji stojącej.

| Phases -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| Section 1 | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | |
| Section 2 | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | |
| Section 3 | | | | | | | | ○ | | | | | | | | |
| Section 4 | | ○ | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| Section 5 | | | | | | | | | | ○ | | | | | | |
| Section 6 | | | ○ | | | | | | | | ○ | | | | | |
| Section 7 | | | | | ○ | | | | | | | | ○ | | | |
| Section 8 | | | | ○ | | | | | | | | ○ | | | | |

PROGRAM 5 MEDI-DREN

Program przeznaczony dla klientów z dużym problemem zatrzymywania wody w nogach. Ten program pomaga zredukować obszary zastojów, w konsekwencji optymalnego odprowadzania głównych stref nóg dotkniętych.

Ten program jest zazwyczaj przeprowadzany po niektórych zabiegach w serii, np. z wykorzystaniem PICOTAGE i fizjologicznych programów.

| Phases -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| Section 1 | | | | | | O | O | O | O | | | | | | | |
| Section 2 | | | | | | | O | O | O | | | | | | | |
| Section 3 | | | | | | | | O | O | | | | | | | |
| Section 4 | O | O | | | | | | | O | O | | | | | | |
| Section 5 | | O | O | | | | | | | O | O | | | | | |
| Section 6 | | | O | | | | | | | | O | | | | | |
| Section 7 | | | | | O | | | | | | | | O | | | |
| Section 8 | | | | O | | | | | | | | O | | | | |

PROGRAM 6 SELE-DREN

Program podobny do poprzedniego, może być wykorzystany, jak fizjologiczny PROGRAM po zabiegach elektrostymulacji lub ultradźwięków, kiedy pacjent musi przejść serię intensywnej rehabilitacji.

| Phases -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| Section 1 | | | | | | | O | O | O | O | | | | | | |
| Section 2 | | | | | | | | O | O | O | | | | | | |
| Section 3 | | | | | | | | | O | O | | | | | | |
| Section 4 | | O | O | | | | | | | O | O | O | | | | |
| Section 5 | | | O | O | | | | | | | O | O | O | | | |
| Section 6 | O | | | O | | | | | | | | O | O | | | |
| Section 7 | | | | | | O | | | | | | | | | O | |
| Section 8 | | | | | O | | | | | | | | | O | | |

